

# PROVTAGNING KAPILLÄRA PROVER



1 Desinficera fingret med alkoholfri desinfektion, eller låt provlämnaren tvätta händerna NOGA med tvål och vatten. Låt torka 5 sekunder.



2 Förbered lansetten genom att ta bort toppen på lansetten med ett vridmoment. Ta ett grepp runt fingertoppen för att den skall fyllas med blod. Stick på ena sidan av fingertoppen genom ett bestämt tryck med lansetten.



3 Torka av den första droppen blod med kompressen. Låt sedan handen hänga till dess att en ny stor bloddroppe bildas. OBS Pressa inte ut blod från fingret, då får du ett utspätt provresultat.



4 Använd den röda hållaren till att greppa ett av glasrören från den stora behållaren. Du behöver ett rör per analys och ytterligare ett rör som B-prov. Ska du analysera PEth och amfetamin behöver du alltså två rör, ett per analys, samt ett B-prov. Totalt 3 rör.



5 För glasröret till fingret och håll öppningen mot bloddroppen tills hela röret är fyllt med blod (det går fort).



6 Ta fram ett av provrören/plasttuberna och för ned det blodfyllda glasröret däri. Stäng locket. Endast ett glasrör per plasttub.



7 Skaka röret ordentligt, så att blodet från glasröret sprider sig i provröret. Detta är viktigt eftersom provröret innehåller ett medel som förhindrar den fortsatta utvecklingen av Peth.



8 Klistra fast en streckkod (likadana streckkoder) på varje plasttub/provrör. Lägg sedan rören i plastpåsen och därefter i det förfrankerade labbkitet. Lägg på postlådan som vanligt.

# PROVTAGNING KAPILLÄRA PROVER



För att ta ETT prov behöver du det som visas på bilden till vänster. Varje kit innehåller material för att ni ska kunna ta ett A-prov och ett B-prov.

I ett kit ingår:

- 2 lancetter/håltagare
- 2 plasttuber
- 2 glasrör (plockas ur det större röret med 100 stycken glasrör)
- 1 förfrankerad box med plastpåse och absorptionspapper

Utöver det behöver ni:

- 1 streckkodsark per provtagning (likadana streckkoder till en patient/ett provtagningstillfälle oavsett mängd analyser)
- 1 röd tång/hållare (OBS det medföljer två tänger per 50 kit så SLÄNG EJ! Tången ska återanvändas och behöver därför rengöras grundligt mellan varje patient för att inte riskera smitta mellan prover. Desinfektion med alkohol går bra så länge alkoholen hinner dunsta innan provtagning.

För frågor kan du alltid kontakta oss, du når oss via telefon på 040-685 00 88 eller via mail på [info@prodiagnostics.se](mailto:info@prodiagnostics.se)

---

## PRODIAGNOSTICS AB

Vellinge Esex 669 - 235 91 Vellinge

Certifierade enligt **ISO 9001:2015** & **ISO 14001:2015**

040 685 00 88

[info@prodiagnostics.se](mailto:info@prodiagnostics.se)

[www.prodiagnostics.se](http://www.prodiagnostics.se)