

Kitet innehåller: 2 provrör med lock och 2 förlängningsrör, box med remiss (som du nu läser), streckkoder finns bara i provkit. Sedan river du av ett ark med 10 etiketter från egen rulle. Du behöver även en Urinmugg (ingår ej i kitet).

INSTRUKTION:


1. Fyll i remissen på omstående sida. Ange klientens Initialer, *ej namn eller personnummer*.
Var noga att ange **E-postadress** och **Kundnummer**!

2. Se till att få urin i ren mugg. Följ gällande regler för att undvika manipulation.

- Skruva av det gula locket, men spara det. Sätt på förlängningsröret.
- Dra upp pistongens bas till linjen på röret, så du har ett nästan fullt rör med urin.
- Vänd på röret och sug in sista urindropparna innan förlängningsröret tas av.
- Bryt av hela det uppstickande handtaget och kasta det samt förlängningsröret.

Skruva på det lilla locket.

Upprepa med nästa rör.

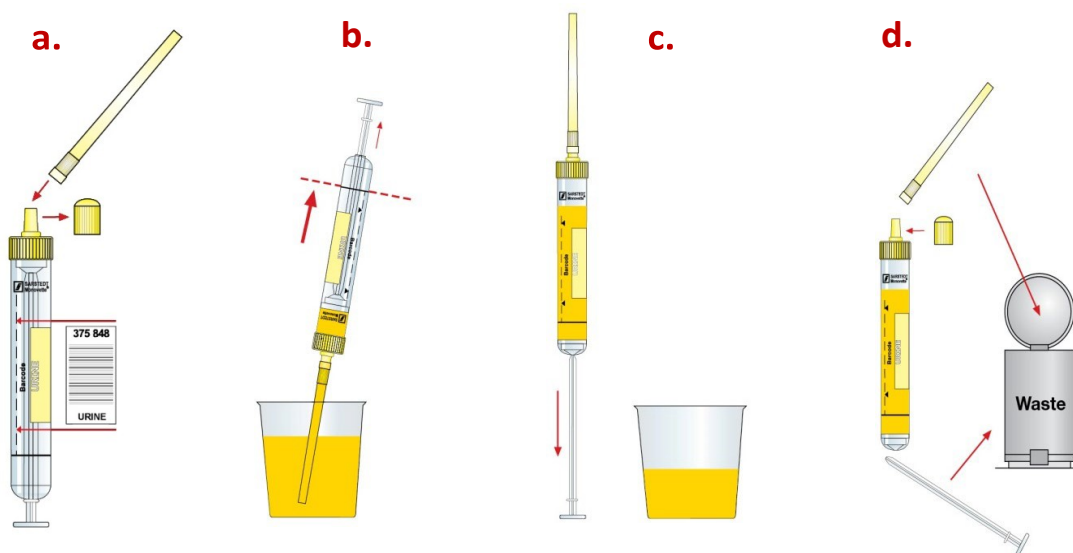

4. Sätt på streckkodsetiketter:

- En på varje provrör,
- En på remissen, översta vänstra hörnet
- Kopiera remissen för uppföljning. Ange klient-namn på den egna kopian!
- Kasta de överblivna streckkoderna på arket när du är klar.

7. Lägg båda provrören i plastpåsen och förslut påsen med förseglingstejpen.

8. Lägg ned i kartongen: **a)** Den förslutna plastpåsen med provrören.

b) Remissen, glöm ej ange **e-postadress** och **kundnummer**!

9. Förslut kartongen och posta.