




BRUKSANVISNING DROGTESTER


Kontrollera datum och att förpackningen är hel.
Ta emot urinprovet och kontrollera temperatur och färg.
Öppna förpackningen omedelbart före testning.
Testet är fuktkänsligt och ska vara förpackat fram till användande.

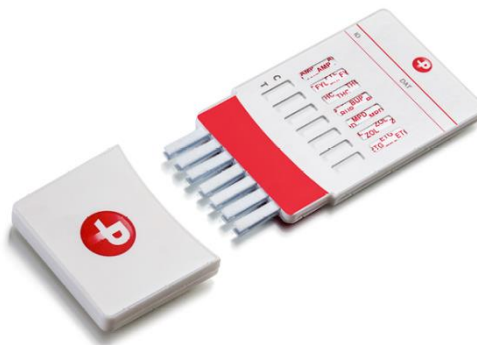


Se till att teststickan och urinprovet uppnått rumstemperatur (15-30 ° C) före testning.

1. Ta ut drogtestet från den slutna förpackningen och använd det så snart som möjligt. Ta av locket och doppa remsornas ändrar i urinprovet i minst 10-15 sekunder. Det röda fältet på plattan ska inte doppas ned.
2. Sätt tillbaka locket på testet.
3. Placera testpanelen på en icke-absorberande, plan yta, ta tiden och vänta tills den röda linjen/linjerna framträder. Resultatet ska kontrolleras efter 5 minuter. Tolka inte resultatet efter 10 minuter.


Negativt Resultat:

 Två röda linjer syns i avläsningsfönstret: En testlinje (T) per drog och en kontrollinje (C) som bekräftar att tillräcklig mängd vätska sugits upp till provet. Styrkan på testlinjen kan variera och vara svagare eller starkare än kontrollinjen.

Positivt Resultat

 Endast en röd linje uppstår i kontrollområdet (C). Frånvaron av en linje i testområdet (T) indikerar ett positivt resultat för drogen i fråga. Låt **8** minuter passera innan testet förklaras positivt. OBS! Testet ger endast preliminärt resultat. Verifiera positiva resultat hos ackrediterat laboratorium.

Ogiltigt Resultat

 Kontrollinje saknas. Otillräcklig mängd urin har sugits upp i remsan, felaktigt förvarat eller för gammalt test eller inkorrekt testprocedur är mest sannolika skäl för utebliven kontrollinje. Gå igenom testrutinerna igen och upprepa med nytt test. Om problemet kvarstår, kontakta PRODIAGNOSTICS.